



Veillez scanner le QR code pour obtenir la notice d'utilisation complète.

PROCÉDURE TEST SALIVAIRE MULTIDROGUES ET ALCOOL



Réalisation du test

1



Laisser le sachet contenant le test atteindre la température ambiante avant de l'ouvrir. Ne pas manger, boire ou fumer 10 minutes avant de faire le test. Déchirer le sachet scellé à partir de l'encoche. Utiliser le test dans l'heure suivant l'ouverture.

2



Retirez le capuchon.

3



Remarque : placer simplement l'éponge dans la bouche, le test ne doit pas être orienté verticalement vers le bas, et l'angle d'inclinaison par rapport à l'horizontale ne doit pas dépasser 45°.

Placer dans la bouche. Attendre que la ligne de contrôle (C) apparaisse, puis retirer le test de la bouche.

4




Démarrer le minuteur et lisez le résultat


Pour les drogues, un résultat négatif peut être lu dès 2 minutes, tandis qu'un résultat positif nécessite 10 minutes. Pour l'alcool, le résultat est à lire entre 1 et 2 minutes.

Interprétation du résultat


Lire le résultat à 10 minutes. Ne pas lire après 20 minutes.

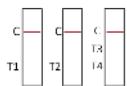

Positif

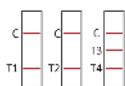

Négatif

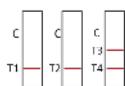

Invalide

Interpréter le résultat pour l'alcool entre 1 et 2 minutes en comparant la couleur obtenue avec l'échelle colorimétrique située au dos du sachet.

Toute teinte bleue indique un résultat positif à l'alcool.



Positif



Négatif

